



心率呼吸监护垫（4G版）

—— 安装调试使用说明 ——

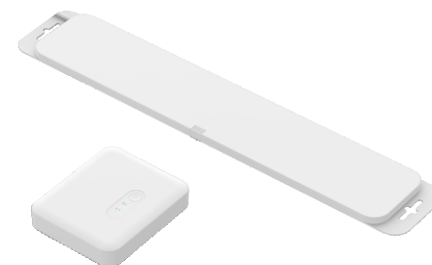

一、安装调试

心率呼吸监护垫安装在长者床板上方，使用时需搭配正常乳胶、海绵、弹簧（席梦思）类床垫使用，将心率呼吸监护垫置于硬质床板和乳胶床垫中间，心率呼吸监护垫可通过专业传感器采集长者的生理参数，如心率、呼吸，实时上报至后台，并且通过算法实时分析，出现异常时能立即自动报警，提醒护理人员及时处理。

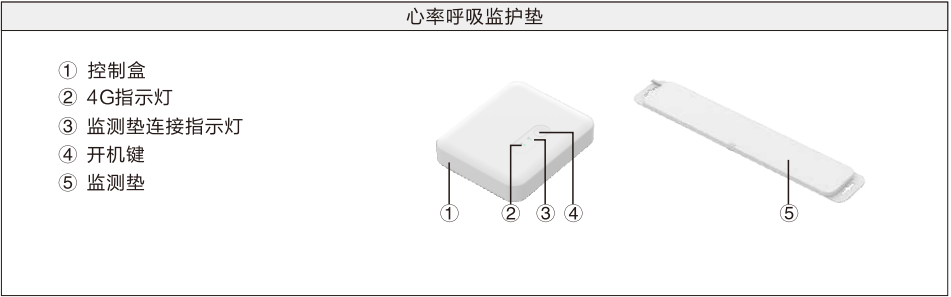

1、产品安装图

- (1) 将心率呼吸监护垫-监测垫固定在床板上，如图1。
- (2) 将心率呼吸监护垫-监测垫连接到心率呼吸监护垫-控制盒上，请使用3M胶将心率呼吸监护垫的控制盒固定在墙壁上或床头柜的侧面。如图2（如使用双板，请将两个监测垫连接在一起）
- (3) 给控制盒通电，4G指示灯、监测垫连接指示灯常亮绿色。

