


# 求救按钮

—— 安装调试使用说明 ——




一、安装调试

安装在长者床头的墙壁上；支持一键报警求救及定位。也可安装在走廊、凉亭等公共区域，拉绳吊坠距离地面10cm的墙壁上。正常绑定后，求救按钮报警或监护手表在此区域报警，监护主机均能收到报警及位置信息。求救按钮内置的定位信标覆盖半径5~7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年。

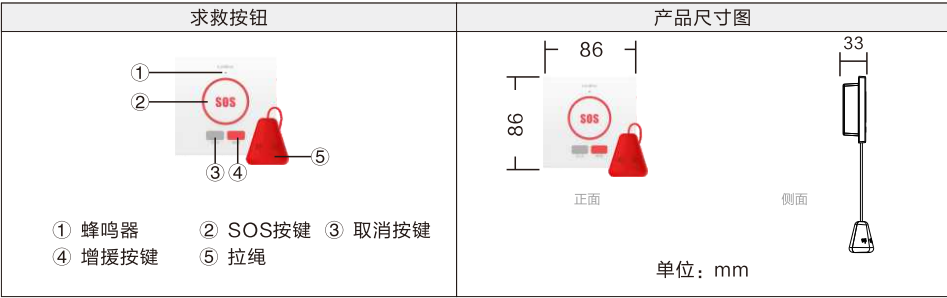

1、产品安装图

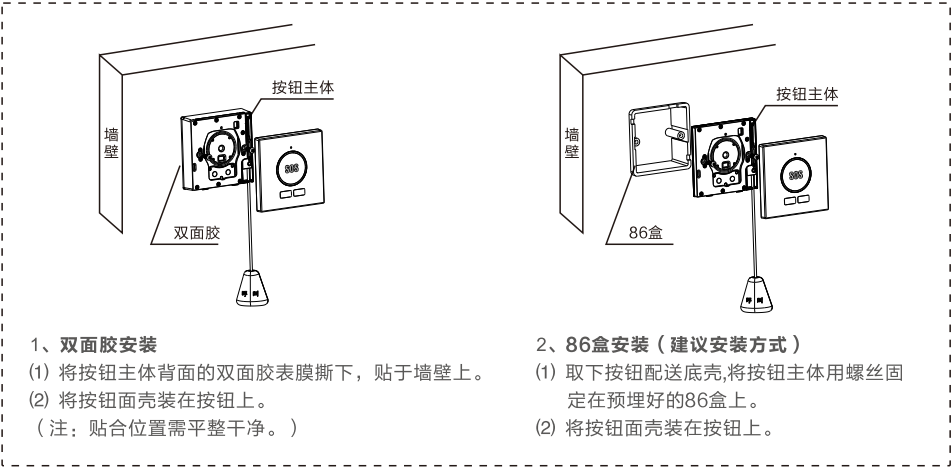

二、使用说明

1、设备使用

开机：将按钮的面盖装在主体上，听到“滴、滴..”响声，设备开机。  
关机：将按钮的面盖从主体上拆下，设备关机。  
报警：按下SOS按键或者拉绳进行报警，设备发出“警铃声”后，发起报警事件。  
取消：按下取消按键，设备发出“滴、滴、滴..”声后，发起取消事件；可取消该设备未处理的报警。  
增援：按下增援按键，设备发出长“滴”声后，发起增援事件。  
取消增援：增援状态下，再按一下“增援按键”，设备发出长“滴”声后，发起取消增援事件。

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 提醒 | 事件上报中：设备发出“滴、滴、滴...”提示音 |
|    | 事件上报成功：设备发出“滴滴、滴滴”提示音   |
|    | 事件上报失败：设备发出“滴滴滴、滴滴滴”提示音 |

2、设备绑定

(1) 扫描下方二维码，下载并安装“机构养老”或“社区养老”App。



提示：可根据您的使用场景，下载对应的绑定App即可。

(2) 设备绑定

① 求救按钮开机后，打开“机构养老/社区养老”App，进入“设备安装-设备绑定”界面。

设备安装



② 房间设备绑定：点击“长者房间设备绑定”按钮，进入后完成“房间信息录入”，根据现场安装要求，在床位或洗手间等其他位置上点击“去绑定”按钮，进入绑定界面后，选择扫码绑定，将手机对准求救按钮背面的二维码，根据App上的提示完成绑定。



③ 公共区域设备绑定：点击“公共区域设备绑定”按钮，进入后在“公共区域求救按钮”栏，输入公共区域名称和所属主机号，点击“去绑定”按钮，进入绑定界面后，选择扫码绑定，将手机对准求救按钮背面的二维码，根据App上的提示完成绑定。



三、技术参数

|       |           |       |                   |
|-------|-----------|-------|-------------------|
| 产品名称： | 求救按钮      | 防水等级： | IP68              |
| 续航时间： | 6年        | 电池类型： | 2节5号锂电池           |
| 工作温度： | -10℃~+55℃ | 存储容量： | RAM-256KB、ROM-2MB |
| 通讯方式： | 4G        | 工作湿度： | 10%~99%           |
| 产品材质： | ABS+PC    |       |                   |