跌倒报警器


一 安装调试使用说明 一



LonBon 来邦 | 来 邦 科 技 股 份 公 司

一、产品概述


产品安装在洗手间或卧室的天花板上,采用 4G Cat.1 通信技术,出厂预装通信卡、即买即用。支持语音通话、跌倒报警、洗手间滞留报警、长时间未入厕提醒等功能。电源适配器供电,IP67 防水等级,在潮湿环境中也能正常工作。

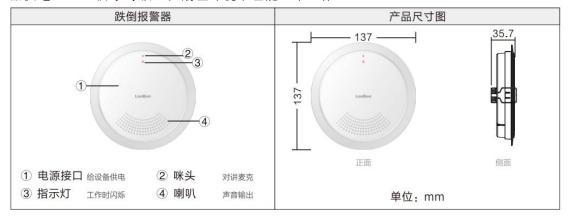


二、安装调试

2.1 安装场所说明

设备嵌入式安装在洗手间或卧室天花板时,安装高度为面壳距离地面 2.3-3 米,推荐高度 2.3 米,设备扬声器孔前后检测距离各 2.5 米,扬声器孔两侧检测距离各 2 米。

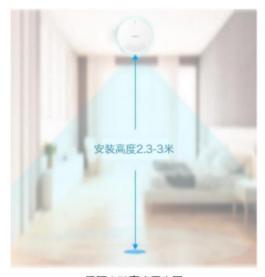

吸顶安装高度示意图

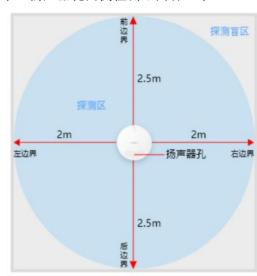



吸顶安装俯视图

一找美工要高清图

2.2 安装位置选择

设备安装在洗手间/房屋屋顶时,设备离灯和吊扇 10cm 以上,尽量装在屋顶中间,使得检测区域最大,不要出现检测盲区,盲区内无法检测跌倒!

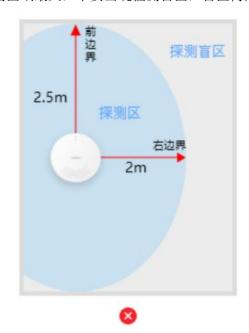

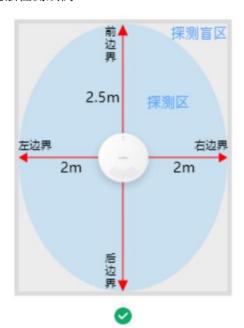


一找美工要高清图

2.3 安装调试步骤

(1) 确定设备安装位置


根据实际洗手间的布局,确定好设备安装位置,如有多个相同布局的洗手间,记录下房间号,便于后面批量选择房间下发配置模版。设备吸顶安装示意图如下:

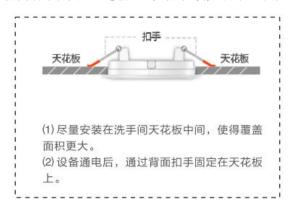

(2) 登录平台设置模版


登录机构养老/社区养老管理平台,在"运维管理→监护设置→跌倒报警器设置"菜单

中,首先设置好安装模版。

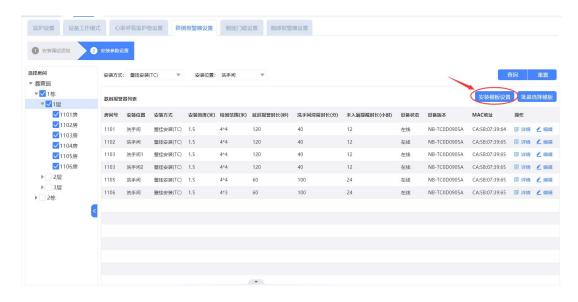

(3) 填写安装模版参数


平台默认 3 个安装模版,可以编辑和删除,也可以创建新的安装模版。创建安装模版后, 依次按照步骤"功能参数→区域编辑→现场照片→人员轨迹"填写所需参数,然后保存模版。

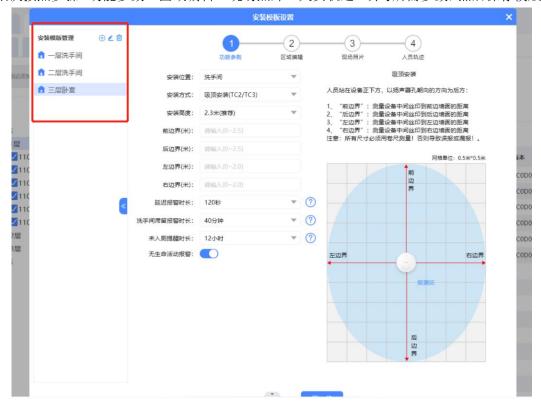

① 步骤一: 功能参数

安装位置选择"洗手间"或"其他位置"、安装方式选择"吸顶安装"、安装高度在 2.3-3 米之间,测量设备安装位置距离前后左右墙面的距离等参数(所有尺寸必须用卷尺进行测量!否则会导致误报!)。

当安装位置为"其他位置"时,可选择是否启用无生命活动报警、离床告警功能。当居 所内长时间无生命活动、老人离床时间过长时设备能自动报警。

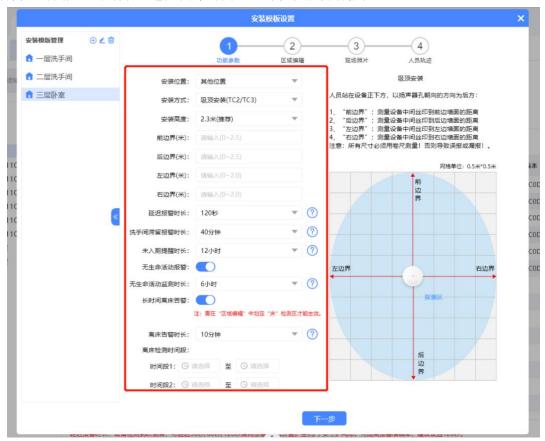

② 步骤二: 区域编辑


默认有 6 个区域,含"床"、"门"、"马桶"、"洗衣机"、"屏蔽区 A"、"屏蔽区 B"。其中"床"和"门"两个区域名称不可修改,其他区域的名称、尺寸、屏蔽事件类型均可修改。若勾选了屏蔽事件为"跌倒",那么在该区域内有人跌倒,设备不会报警。

完成区域编辑后,可在界面右侧将各区域的图标,按照他们在实际洗手间内的位置,拖入示意图中。注意测量每个区域与最近两侧墙体的距离。点击图标右上角的"X"即可删除区域。




③ 步骤三: 现场照片

上传现场照片,尽量拍全洗手间各个角落,也可以不上传照片,直接进入下一步。

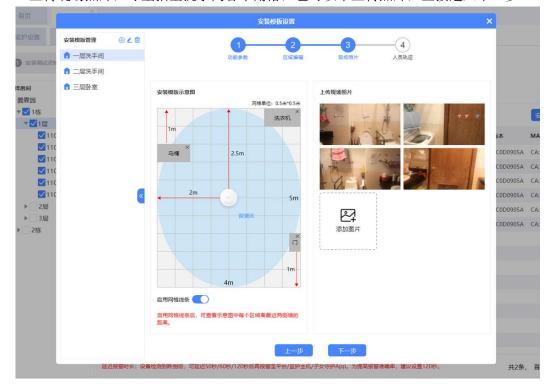

(4) 选择房间下发模版

设置好安装模版后,选择有相同户型的房间,保存后安装模版将会下发至房内的洗手间 或其他位置的跌倒报警器上。

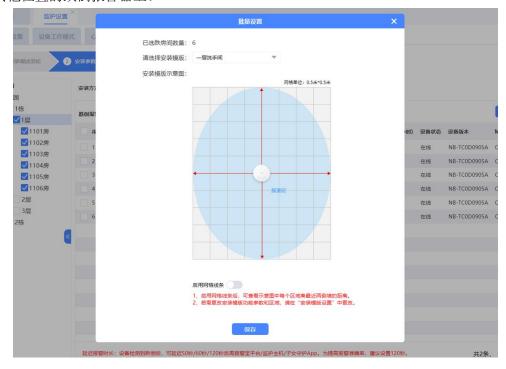

(5) 登录 App 绑定绑定

登楼机构养老/社区养老/设备管理 App,在"设备安装→设备绑定→长者房间设备绑定"中,按照指示,在洗手间设备中找到跌倒报警器。

① 点击"去安装"选择安装模版(也可不选择模版,但需手动填写参数)。




② 选择完安装模版后,点击"去绑定",进入绑定界面,将手机尽量靠近该跌倒报警器,点击 App 上"绑定"按钮,根据 App 上提示完成绑定。

(6) 设备功能检测

将跌倒报警器插上电源后,查看指示灯状态。待指示灯红灯变成常亮并快速熄灭状态时,表示工作正常。按下 SOS 按键或者拉绳可进行报警求救,听到"正在报警"表示正在报警中,听到"报警成功"表示报警成功。

在"去安装→人员轨迹"界面,人员在房内走动和模拟跌倒时,若界面上能实时看到房内人数、行走轨迹、姿态变化、跌倒等动作,那么设备雷达功能正常。

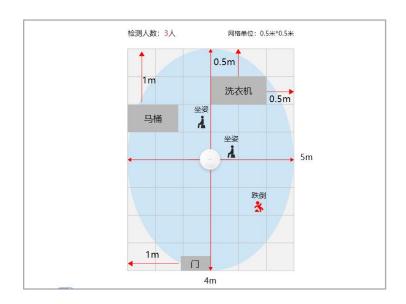

三、技术参数

产品名称:	跌倒报警器	供电方式:	Type-C
工作电压:	9V	通信方式:	4G Cat.1
探测角度:	130°	探测范围:	4*5 米
防水等级:	IP67	安装高度:	2.3-3 米
工作湿度:	10%~99%	工作温度:	-10°C~±55°C
尺寸:	Ø137*25mm	安装方式:	吸顶安装