


- 2、**换药提醒**：按下主界面面上的"换药提醒"按键(可能需要先设置显示该功能按键)，主机上相应的路选分机按钮呈黄色闪亮，并语音提示"XX床换药提醒"。
- 3、**紧急增援**：按下主界面面上的“紧急增援”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可向主机发起紧急增援，主机还可以接听，接通后可通过手持跟主机进行双向通话。
- 4、**健康小巴士**：通过对接点播直播服务器后，按下主界面面上的"健康小巴士"按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可通过分机屏幕观看与健康相关的知识类视频类节目和图文类文章。
- 5、**消息通知**：按下主界面面上的“消息通知”按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可查看已发送的护理记录、用药说明、费用情况等提示性内容。
- 6、**更多应用**：按下主界面面上的“更多应用"按键(可能需要先设置显示该功能按键)，可进入到更多按键的界面，来进一步使用更多的功能按键；这些更多的功能按键(如医院简介、费用查询、营养点餐、服务评价等)可通过服务器设置去完成。

IP床位分机

产品安装使用说明

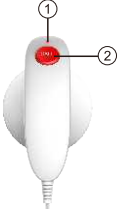



分机部件详解	手持呼叫器部件详解
 ① 10寸触摸屏 ③ 手持呼叫器 ② 喇叭 ④ 手持呼叫器底座	 ① MIC位置 ② CALL键

一、安装调试：

1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装设备带示意图

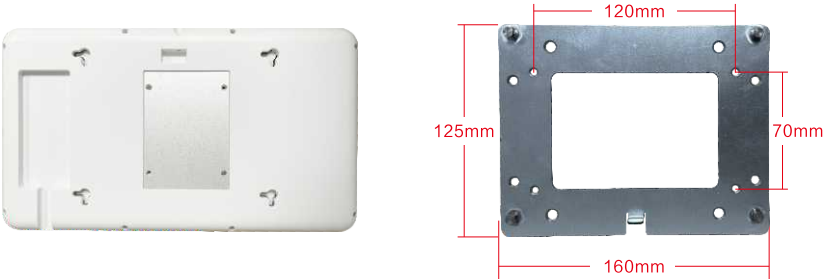

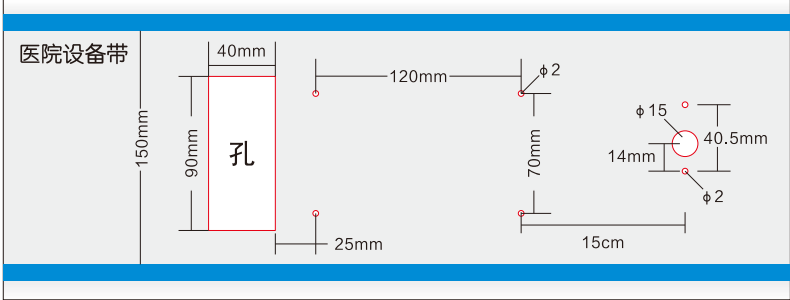

说明：
1、设备带上打4个螺丝孔，螺丝孔距离为120*70mm；
2、在左边螺丝孔的左侧25mm处，再开一个槽，尺寸为90*40mm，相应的线缆从此槽引出；
3、将配送的壁挂支架安装在设备带上，相应的线缆接好设备的接口或引线上，线材整理好放入槽内；再将设备挂于支架上，主机背面有4个挂孔，对应于壁挂支架的挂柱上，最后将设备向下推动卡住即可；
4、侧面有个M4的锁紧螺丝需要锁紧防脱。

2、背面接口说明：

(1) **网络接口**：将配送的“网络水晶头转引线”插入到网口接口(注意方向)，再连接网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。

(2) **电源接口**：将配送的“电源红黑引线”插入到电源接口(注意方向)，红线、黑线分别于另购电源箱的其中1对+24V、GND接线柱对应连接，给分机供电(供电范围12~24V)。


(3) **外部接口**：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时必须先断电)

① 外接门灯(HBW-ME)：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

② 外接门灯(NBW-ME5)：将接门灯的“电源+、数据、电源-”3芯引线对应接到门灯的红、白、黑3芯线上。

③ 外接报警按钮(ANW3)：将接报警按钮的“电源-、检测”2芯引线对应接到报警按钮的2芯引线上，无需分极性。

④ 外接报警按钮(ANW4)：将接报警按钮的“电源+、电源-、检测”3芯引线对应接到报警按钮的红、黑、白3芯线上。

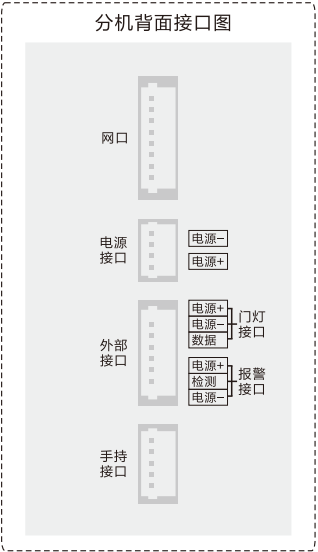

二、设置调试：

1、长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统设置。

2、系统设置中有些设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

3、输入序列号后四位进入基本设置，输入本机编号(包括:所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址。

例如：

“本机编号”：1号主机 + 1号分机

“地址盒IP”：192.168.1.169(输入 与主机同-地址盒)

“IP地址”：192.168.1.11

“子网掩码”：255.255.255.0

“默认网关”：192.168.1.1

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

4、系统信息:可查看分机的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

三、使用说明：

分机手持上有1个物理按键：CALL。

分机主界面上有1个功能键：呼叫。

可根据需要设置显示更多功能按键，如换药提醒、紧急增援、健康小巴士、消息通知、以及更多应用等；部分功能键还需要对接相关服务器才可以使用。

1、**呼叫护士**：按下手持上的"呼叫"按键，或主界面上的"呼叫"按键，可向护士站主机发起呼叫，主机接通后可通过手持跟主机进行双向通话。